






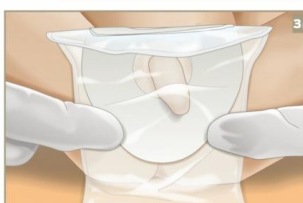


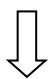


## Recueil d'urines sur collecteur pédiatrique

<b>1.</b> Se laver les mains	<b>2.</b> Installer l'enfant sur le dos	<b>3.</b> Enlever sa couche	<b>4.</b> Nettoyer la zone urogénitale à l'eau et au savon
			
<b>5.</b> Puis la nettoyer à l'aide de la lingette antiseptique fournie d'un seul geste de l'avant vers l'arrière	<b>6.</b> Sortir le collecteur (poche) de son emballage et décoller l'adhésif, <b>sans toucher l'intérieur</b>	<b>7.</b> Coller la poche en commençant par le bas. <b>Pour une fille</b> , la partie évidée doit recouvrir toute la zone urogénitale. <b>Pour un garçon</b> , le pénis doit passer dans la zone évidée.	
		<b>Fille</b> 	<b>Garçon</b> 
<b>8.</b> Après la pose, masser doucement la partie adhésive de la poche (pour éviter les fuites)	<b>9.</b> Surveiller régulièrement si l'enfant urine. NB : Il est possible de remettre une couche et de rhabiller l'enfant. <b>Si l'enfant n'urine pas dans les 30 minutes, si la poche est souillée ou partiellement décollée, en poser une nouvelle.</b>		
<b>10.</b> Si des urines sont recueillies : décoller délicatement la poche et la placer, ouverture en haut, <b>sans transvaser</b> , dans le pot stérile fourni par le laboratoire.		<b>11.</b> Refermer le pot, l'identifier (nom et prénom) et l'apporter au laboratoire dès que possible (utiliser le sachet fourni, joindre la fiche complétée). Si délai, conserver le pot au réfrigérateur.	  <b>LABORATOIRE</b>

### Renseignements cliniques (si possible selon l'âge de l'enfant)

- ✓ L'enfant a-t-il :
- . des envies plus fréquentes d'uriner ?  OUI  NON
  - . des brûlures lorsqu'il / elle urine ?  OUI  NON
  - . de la fièvre ?  OUI  NON
  - . mal en bas du dos ?  OUI  NON
  - . précisez si autres symptômes : .....
- ✓ A-t-il pris des antibiotiques depuis moins d'une semaine ?  OUI - lesquels ?  NON

**NOM / Prénom :**

**Heure du recueil :**